

Care Bag Kit de voyage



Code article ACL : **9538557**


Présentation

Ce kit de voyage est destiné aux enfants et adultes malades en transports. Il est composé d'un sac hygiénique absorbant pour urines et vomis, et d'une lingette nettoyante et rafraîchissante. Au format poche, il est le complice des sacs à main et des boîtes à gants

Mode d'emploi

1. Ouvrir le pack et extraire un sac
2. Déplier le sac
3. Ouvrir le sac, et contrôler la présence du tampon absorbant au fond du sac
4. Tenir le sac avec les mains
5. Vomir dans le sac
6. Attendre la gélification des liquides (+/- 500 ml maximum en quelques secondes)
7. Fermer le sac, nouer et jeter à l'endroit approprié.
8. Se rafraîchir à l'aide de la lingette

Précautions d'emploi

 Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi.

Composition

Sac en polyéthylène muni de liens. Tampon super-absorbant (SAP) composé d'un support non-tissé à base de sulfate couplé à des copolymères à base d'acrylate de sodium.

Lingette: aqua, triméthylpropane, tricaprilate/tricapate, ceteth 24, diazolidinyl urea, diméthicone ; PEG 100 Stereate, cholet 24, glycerin, cetareth-20, ctearyl alcohol, glyceril stearate, perfume, chlorhexidine dicluconate 20%



Efficacité

Absorption de 500 ml de liquide organique ou plusieurs litres d'eau déminéralisée

Avantages

- Evite le nettoyage du véhicule, du lit...
- Supprime les odeurs
- Remplace avantageusement le « haricot » ou le sac papier.
- Hygiène accrue, produit à usage unique, gain de temps, blocage des odeurs, élimination simple et sans risque...

Identification

Chaque produit est identifié par un numéro de lot  et une date de péremption  (24 mois).

Conformité


Conforme à la Directive
93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux – Classe I.



Ce produit est conforme à la législation en termes de risque de pollution après incinération et ne rejette aucun dérivé chloré propre à la formation de dioxine.

Dangers/sécurité

Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne.

 Risques très légers d'irritation oculaire ou des voies respiratoires en cas de contact prolongé avec le tampon absorbant.

A conserver avant utilisation dans son emballage fermé éloigné de toute source d'humidité.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande

Code douanier

5603149090

Conditionnement

Unité	Pack de 3 kits de voyage	15 (L) x 0.3 (l) x 10 (h) cm / 0.12 Kg
Présentoir	8 packs	26 (L) x 16 (l) x 10.5 (h) cm / 1 Kg