

Care Bag Protège WC & cuvette



Code article ACL : **9538534**


Présentation

Care Bag® protège WC se pose directement sous la lunette des toilettes, il permet alors de disposer de toilettes sèches. Il est aujourd'hui utilisé en outdoor, sur les bateaux, ainsi que par les ONG et les militaires en campagne (utilisation sur leurs systèmes de toilettes en évitant toute problématique de gestion de l'eau et des eaux noires).

Mode d'emploi

1. Ouvrir la boîte/ le pack et sortir le rouleau de sacs
2. Dérouler le 1^{er} sac et le tirer selon les pointillés
3. Ouvrir le sac, et enlever le tampon super- absorbant. Garder le tampon à proximité.
4. Placer le sac sur la cuvette
5. Faire ses besoins dans le sac
6. Attendre que le contenu se solidifie (+/- 500 ml max). Ce processus s'opère en quelques secondes.
7. Fermer le sac en faisant un nœud avec les lanières. Jeter de façon appropriée.

Précautions d'emploi

 Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi.

Composition

Sac en polyéthylène muni de liens. Tampon super-absorbant (SAP) composé d'un support non-tissé à base de sulfate couplé à des copolymères à base d'acrylate de sodium.

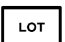

Efficacité

Absorption de 500 ml de liquide organique ou plusieurs litres d'eau déminéralisée

Bénéfices

- Protection pour tout type de cuvette et WC. Particulièrement recommandé dans le cadre des isolements infectieux, de l'oncologie, des urgences, du bloc opératoire, des activités plein air ...
- Hygiène accrue, produit à usage unique, gain de temps, blocage des odeurs, élimination simple et sans risque...

Identification

Chaque produit est identifié par un numéro de lot  et une date de péremption  (5 ans).


Conformité

Conforme à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux – Classe I.
Ce produit est conforme à la législation en termes de risque de pollution après incinération et ne rejette aucun dérivé chloré propre à la formation de dioxine.



Dangers/sécurité

Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne.

 Risques très légers d'irritation oculaire ou des voies respiratoires en cas de contact prolongé avec le tampon absorbant.

A conserver avant utilisation dans son emballage fermé éloigné de toute source d'humidité.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Code douanier

5603149090

Conditionnement

Unité	Boîte de 20 sacs	Sac : 65x40 cm / Tampon : 13x24 cm
Carton	18 boîtes de 20 sacs (soit 360 sacs)	41 (L) x 36 (l) x 37 (h) cm / 14 Kg
Palette	30 cartons - Soit 540 packs / 10800 sacs	80 (L) x 120 (l) x 198 (h) cm / 440 Kg (palette non comprise)

Elimination

Déchets ménagers pour l'élimination traditionnelle. Dans le cas d'un patient contaminé, l'élimination se fera en déchets à risque (DASRI).