

Care bag Protège seau



Code article ACL : 7831738

Présentation

Conçu et recommandé pour la protection contre les souillures des seaux de chaise percée, le sac hygiénique Care Bag® Protège Seau de chaise percée permet une utilisation dans des conditions optimales de sécurité pour l'utilisateur et son entourage, que ce soit à domicile, en établissement de soins ou encore en voyage.

Mode d'emploi

1. Ouvrir le pack et en extraire le rouleau de sacs
2. Dérouler le 1^{er} sac et le détacher selon la prédécoupe
3. Ouvrir le sac, et contrôler la présence du tampon absorbant au fond du sac
4. Disposer le sac sur le seau de chaise percée
5. Faire les besoins dans le sac
6. Attendre la gélification des liquides (+/- 500 ml maximum en quelques secondes)
7. Fermer le sac, nouer et jeter à l'endroit approprié.

Précautions d'emploi

 Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi. Ne pas laisser à la portée des enfants

Composition

Sac en polyéthylène muni de liens. Tampon super-absorbant (SAP) composé d'un support non-tissé à base de sulfate couplé à des copolymères à base d'acrylate de sodium.

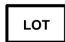

Efficacité

Absorption de 500 ml de liquide organique ou plusieurs litres d'eau déminéralisée

Bénéfices

- Protection pour tout type de seaux. Particulièrement recommandé dans le cadre des isolements infectieux, de l'oncologie, des urgences, de la maternité, de la radiologie, ...
- Hygiène accrue, produit à usage unique, gain de temps, blocage des odeurs, élimination simple et sans risque...

Identification

Chaque produit est identifié par un numéro de lot  et une date de péremption  (5 ans).

Conformité


Conforme à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux – Classe I.

Ce produit est conforme à la législation en termes de risque de pollution après incinération et ne rejette aucun dérivé chloré propre à la formation de dioxine.



Dangers/sécurité

Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne.

 Risques très légers d'irritation oculaire ou des voies respiratoires en cas de contact prolongé avec le tampon absorbant.

A conserver avant utilisation dans son emballage fermé éloigné de toute source d'humidité.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Code douanier

5603149090

Conditionnement

Unité	Boîte de 20 sacs	Sac : 52x40 cm / Tampon : 13x24 cm
Carton	18 boîtes de 20 sacs (soit 360 sacs)	41 (L) x 36 (l) x 37 (h) cm / 14 Kg
Palette	30 cartons - Soit 540 packs / 10800 sacs	80 (L) x 120 (l) x 198 (h) cm / 435 Kg (palette non comprise)

Elimination

Déchets ménagers pour l'élimination traditionnelle. Dans le cas d'un patient contaminé, l'élimination se fera en déchets à risque (DASRI).