

Care Bag

Sac vomitoire




Code article ACL : **7733987**

Présentation Le sac vomitoire absorbant est idéal pour les interventions d'urgence (pompiers, SAMU, ambulance...), et lors de tout transport : sanitaire, scolaire, voyage. Il est adapté à l'adulte et à l'enfant.

Mode d'emploi

1. Ouvrir le pack et extraire un sac
2. Déplier le sac
3. Ouvrir le sac, et contrôler la présence du tampon absorbant au fond du sac
4. Tenir le sac avec les mains
5. Vomir dans le sac
6. Attendre la gélification des liquides (+/- 500 ml maximum en quelques secondes)
7. Fermer le sac, nouer et jeter à l'endroit approprié.

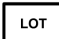

Précautions d'emploi  Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi. Ne pas laisser à la portée des enfants

Composition Sac en polyéthylène muni de liens. Tampon super-absorbant (SAP) composé d'un support non-tissé à base de sulfate couplé à des copolymères à base d'acrylate de sodium.

Efficacité Absorption de 500 ml de liquide organique ou plusieurs litres d'eau déminéralisée


Avantages

- Particulièrement recommandé pour les services d'oncologie, de dialyse, la salle de réveil post-opératoire ainsi que tous les services d'urgence tels que les SAMU, pompiers, ambulances.
- Remplace avantageusement le « haricot » ou le sac papier.
- Hygiène accrue, produit à usage unique, gain de temps, blocage des odeurs, élimination simple et sans risque...

Identification Chaque produit est identifié par un numéro de lot  et une date de péremption  (5 ans).

Conformité Conforme à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux – Classe I.
Ce produit est conforme à la législation en termes de risque de pollution après incinération et ne rejette aucun dérivé chloré propre à la formation de dioxyde.



Dangers/sécurité Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne.
 Risques très légers d'irritation oculaire ou des voies respiratoires en cas de contact prolongé avec le tampon absorbant.
A conserver avant utilisation dans son emballage fermé éloigné de toute source d'humidité.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande

Code douanier 5603149090

| Unité | Boîtes de 20 sacs | Sac : 25 x 25 cm / Tampon : 13 x 24 cm |
|---------|--|--|
| Carton | 21 packs de 20 sacs (soit 420 sacs) | 77 (L) x 37 (l) x 17 (h) cm / 10 Kg |
| Palette | 33 cartons -soit 693 boîtes / 13860 sacs | 80 (L) x 120 (l) x 196 (h) cm / 340 Kg |

Elimination Déchets ménagers pour l'élimination traditionnelle. Dans le cas d'un patient contaminé, l'élimination se fera en déchets à risque (DASRI).